



Miru

1day Menicon Flat Pack



**Lenti a contatto disposable giornaliere
con tecnologia Smart Touch™ e Smart Fit**



sferiche




toriche



multifocali



Il massimo della comodità nel campo delle lenti a contatto

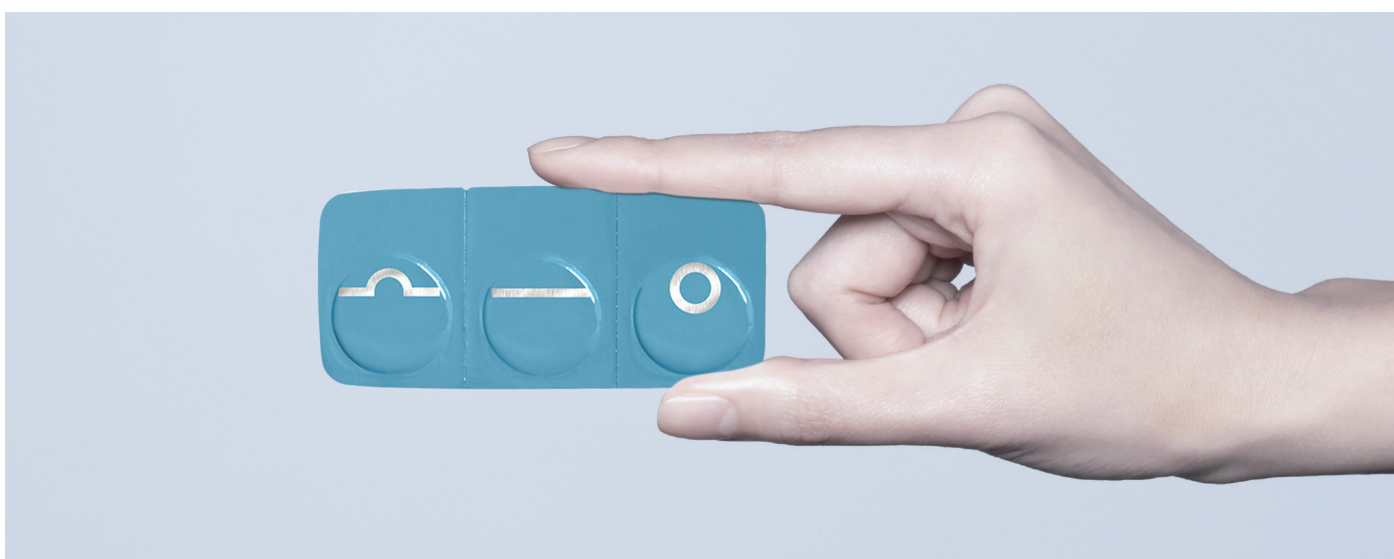

La confezione di lenti a contatto più sottile del mondo, progettata pensando al portatore, per una manipolazione più facile ed un utilizzo più igienico e confortevole.

Facile da aprire

Esclusivo foglio di alluminio morbido e facile da aprire

Facile da trovare

Nessuna ricerca della lente nella soluzione

Facile da applicare

All'apertura del blister la lente si presenta con il lato esterno rivolto verso l'alto

Facile da indossare

Lente monouso, si indossa una volta sola e poi si getta via

Progettato con cura, il blister estremamente sottile e leggero viene fornito in una pratica custodia da 30 lenti, è facile da riporre e occupa poco spazio, ideale per i viaggi o per lo sport.



Igiene

Tecnologia Smart Touch™ per una manipolazione igienica della lente

Il blister esclusivo permette alla superficie interna della lente di rimanere incontaminata fino al momento dell'inserimento.


Il portatore tocca solo la superficie esterna della lente.



All'apertura la superficie esterna della lente è sempre rivolta verso l'alto.



Si elimina la necessità di toccare la superficie interna della lente.

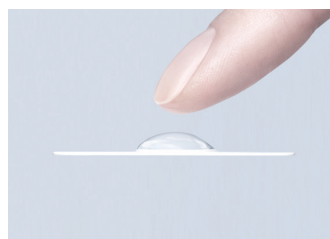

Si riduce il rischio di contaminazione della superficie interna della lente.



Minore manipolazione per una maggior igiene.

Ridotto rischio di contaminazione microbica



Numero di colonie batteriche isolate dalle lenti dopo averle manipolate per estrarle dal blister.

Active compliance™

- Il packaging è stato progettato specificamente per l'uso singolo.
- La mancanza del tradizionale blister a forma di vaschetta impedisce il riutilizzo del blister come contenitore.
- Il volume della soluzione in cui è immersa la lente, di soli 0,2 ml, è stato ottimizzato per la conservazione e impedisce il riutilizzo.

SMART TOUCH™




Miru 1 day Flat Pack per una giornata più confortevole

Progettata per far fronte alle sfide che il nostro frenetico stile di vita ci presenta, come l'uso di dispositivi digitali, i viaggi, lo sport, gli ambienti climatizzati.

Naturalmente bagnabile


Questo materiale biomimetico si lega naturalmente alle lacrime utilizzando un meccanismo di legame simile a quello dello strato mucinico del film lacrimale, trattenendo il liquido e permettendo una rapida reidratazione della lente ad ogni ammiccamento.

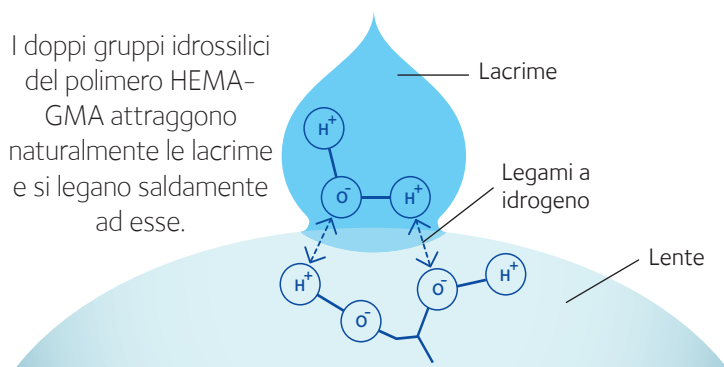

Le lenti Miru 1 day aiutano a mantenere l'integrità del film lacrimale più a lungo durante il giorno.

Tecnologia Centraform™ – Bordi lisci per un comfort ottimale

Il profilo basso del bordo crea una minima discontinuità tra congiuntiva e palpebra, permettendo a quest'ultima di muoversi comodamente sopra la lente.

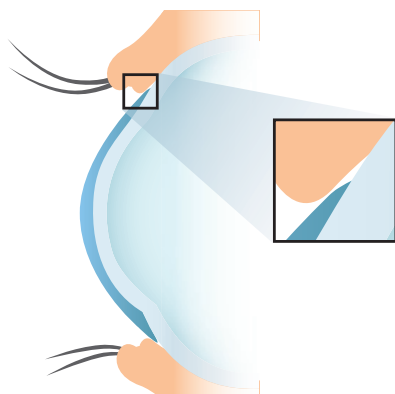


Bordo particolarmente liscio, progettato per minimizzare le frizioni e garantire così un comfort ottimale.




Ambiente

Ci prendiamo cura del nostro ambiente
Menicon sostiene gli obiettivi di sviluppo sostenibile


I vantaggi della tecnologia CENTRAFORM™

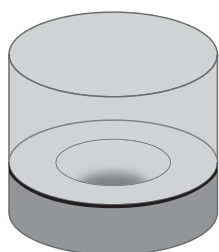

Vengono creati degli stampi per ogni parametro della lente a contatto.

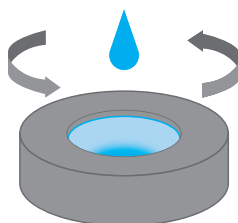

Il materiale della lente viene iniettato nello stampo, ruotato e controllato con precisione.

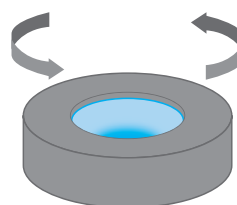

Polimerizzazione della lente.

CENTRAFORM™ è un **processo** unico di **produzione delle lenti completamente automatizzato** che produce ottiche asferiche di alta qualità in comode lenti sottili, con livelli eccezionali di riproducibilità e precisione.

L'utilizzo di un solo stampo concavo, progettato specificamente per ogni parametro della lente, consente di utilizzare meno materie prime ed energia durante la produzione, aggiungendo un ulteriore contributo alle caratteristiche eco-compatibili del prodotto.

La progettazione ingegnosa rende queste lenti la scelta ideale per coloro che conducono uno **stile di vita attivo**, sono infatti **facili da portare con sé ovunque** e rappresentano una valida opzione per i portatori che **alternano l'uso delle lenti a contatto agli occhiali**.

Un futuro sostenibile in vista

Meno materie prime

80%

IN MENO DI PLASTICA

La plastica usata nella confezione delle lenti è stata ridotta di circa l'80%.¹

Meno rifiuti

99%

RICICLATO

La plastica utilizzata nel processo di produzione è riciclata al 99% circa.²

Attenzione all'ambiente

100%


RICICLATO

Le confezioni sono fatte di plastica riciclata al 100%.³




Visione

Miru 1 day Flat Pack toric ha un design unico
Bi-asferico più sottile

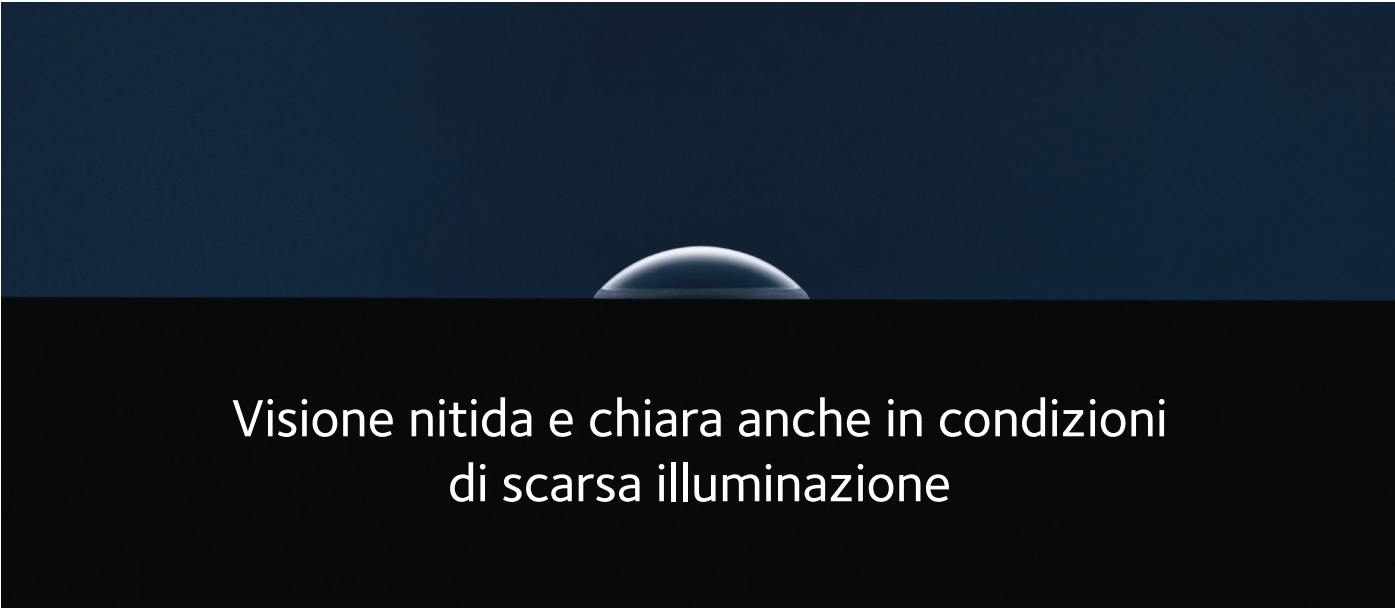


**Visione nitida e chiara anche in condizioni
di scarsa illuminazione**


Questo ingegnoso sistema di stabilizzazione dinamica asimmetrica si adatta ai contorni naturali delle palpebre, assicurando alti livelli di comfort e stabilità degli assi.

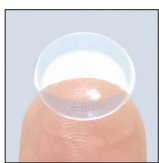

La tecnologia Smart Fit orienta naturalmente la lente in modo corretto, indipendentemente dal modo in cui viene applicata.

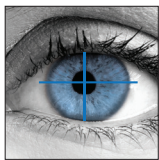


Il nuovo design della lente torica rispetta la naturale copertura asimmetrica della cornea da parte della palpebra ed ha un profilo di spessore minimo che migliora il comfort.

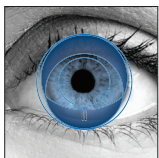


Il doppio slab-off verticale fornisce una stabilizzazione periferica, impedendo la rotazione degli assi ed ottimizzando la centratura della lente, assicurando una visione chiara e stabile.

Il design ottico bi-asferico fornisce una gestione dell'aberrazione sferica longitudinale meridionale che tiene conto di ogni leggero disallineamento degli occhi e delle lenti nei meridiani, mantenendo le prestazioni visive.

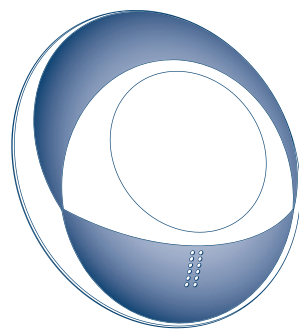



Miru 1 day Flat Pack multifocal Neuro Adaptive™ Design

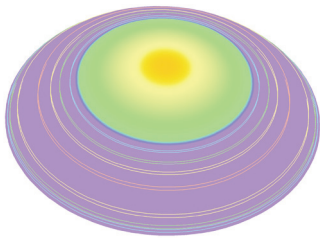

Design Neuro Adaptive™ – Visione Centro-Vicino

Adattamento facile con transizioni naturali e fluide attraverso la visione da vicino, intermedia e da lontano.

Il sottile design bi-asferico migliora il comfort e la qualità visiva, fornendo una profondità di fuoco estesa e un sofisticato controllo delle aberrazioni.

Applicazione di successo con Miru 1 day Flat Pack multifocal

Miru 1 day Flat Pack multifocal è stata specificamente progettata per facilitare l'applicazione delle lenti a contatto multifocali.

- Massimizzare il potere di sfera positivo durante l'esame refrattivo per lontano
- Determinare la correzione al vertice(>+/-4D) e calcolare l'equivalente sferico fino a 1D di astigmatismo
- Determinare l'occhio dominante
- Selezionare l'addizione iniziale. Gli aggiustamenti di potere non sono di solito necessari, è preferibile applicare come prima scelta un potere positivo superiore che risulta sempre ben tollerato.



L'applicazione delle lenti a contatto non è mai stata così semplice con i nostri nuovi calcolatori online:

multifocal.meniconcalculator.com
toric.meniconcalculator.com

Selezione iniziale della lente

Add
+0.75D
a
+1.25D




Add
+1.50D
e superiore




Ottimizzazione visione per lontano

Affinare sfera per lontano

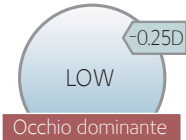


Affinare sfera per lontano

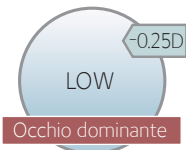


Ottimizzazione visione per vicino

Aumentare potere positivo

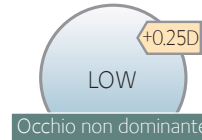

Aumentare potere positivo

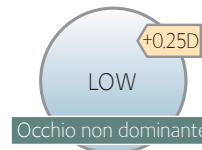


Consiglio generale:
Preferire un potere per lontano più positivo scegliendo sempre l'addizione minima richiesta per la lettura. Per miglioramenti utilizzare una lente positiva della cassetta di prova aumentando il potere secondo necessità. È anche possibile effettuare una sovrarefrazione in binoculare.

Specifiche di prodotto

Caratteristiche	Materiale	Sferica, Torica e Multifocale	Hioxifilcon A
	Contenuto d'acqua	Sferica, Torica e Multifocale	57%
	Tinta di manipolazione	Sferica, Torica e Multifocale	Azzurro
	Design	Sferica Torica e Multifocale	Asferico Bi-asferico
	Produzione	Sferica, Torica e Multifocale	Tecnologia CENTRAFORM™

Parametri	Curva Base	Sferica e Torica Multifocale	8.6mm 8.4mm
	Diametro	Sferica Torica Multifocale	14.2mm 14.5mm 14.4mm
	Poteri	Sferica	+4.00D a +0.50D (intervalli di 0.25D) da -0.50D a -6.00D (intervalli di 0.25D) da -6.50D a -10.00D (intervalli di 0.50D)
		Torica	+2.00D a -6.00D (intervalli di 0.25D) -6.50D a -10.00D (intervalli di 0.50D)
		Multifocale	+4.00D a -6.00D (intervalli di 0.25D) -6.50D a -10.00D (intervalli di 0.50D) Addizione: LOW
	Cilindri	Torica	-0.75, -1.25, -1.75D (-1.75D è disponibile solo per l'asse 180°)
	Assi	Torica	15°, 90°, 165° e 180°

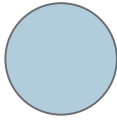Tacca di posizionamento		Sferica e Multifocale	
		Torica	

Porto	Modalità di porto	Sferica, Torica e Multifocale	Porto giornaliero
-------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Packaging		Sferica, Torica e Multifocale	Confezione di prova da 6 lenti Confezione da 30 lenti
-----------	--	-------------------------------	--



SMART TOUCH™